

Bedienungsanleitung

Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor®

- 1 -

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie mit der Benutzung des Wund-Spreizer-Systems GoldLine by Condor® beginnen!

Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® kann an alle OP-Tische angebracht werden, die mit einer Rechteck-Schiene versehen sind.

Zentralhalter:

Der Zentralhalter wird an der vorhandenen OP-Tischschiene nach der Sterilabdeckung angebracht. Achten Sie bitte darauf, dass die Klammer des Zentralhalters vollständig geöffnet ist (durch Linksdrehung des Handrads). Nach dem Aufsetzen des Zentralhalters fixieren Sie die Klammer durch Rechtsdrehung des oberen Handrads. Prüfen Sie den sicheren Halt des Zentralhalters!

Bitte beachten Sie auch unsere Funktionsbeschreibungen für die Artikel-Nr.

100.060.060 E „Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung“ und

100.060.060 EL „Zentralhalter mit Exzenterverschluss und integrierter Isolierung, inkl. zwei Klammern“!

Anbringen der Aufnahme einschl. Querstange:

Öffnen Sie den Exzenterverschluss am Zentralhalter und führen Sie nun die Querstange der Aufnahme in die Spannklaue ein. Richten Sie die Aufnahme so aus, dass genügend Platz zwischen System und Patient sichergestellt ist. Fixieren Sie die Aufnahme durch Umlegen des Spannhebels am Zentralhalter.

Bitte beachten Sie auch unsere Funktionsbeschreibung für die Artikel-Nr.

100.170.080 K „Aufnahme“ und 100.440.040 K „Querstange mit Kugel“!

Anbringen der Haltearme:

Öffnen Sie den jeweiligen Exzenterverschluss an der Aufnahme einschl. Querstange (Kugelelemente).

Schieben Sie den Kupplungsschieber zurück und führen Sie nun den Haltearm entsprechend beider schwarzen Markierungen ein. Markierungen befinden sich sowohl auf der Kupplung als auch auf dem Haltearm.

Nach Loslassen des Kupplungsschiebers in die Ausgangsposition ist der Haltearm in der Kupplung verriegelt.

Prüfen Sie den sicheren Halt!

Nun stellen Sie den anatomischen Vorgaben entsprechend die Haltearme ein.

Die Haltearme werden durch Umlegen der Exzenterverschlüsse verriegelt.

(Der Aufdruck CLOSED ist nun lesbar. Zur Justierung ist der Aufdruck OPEN lesbar).

Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen System und Patient!

Klammer:

Öffnen Sie den Exzenterverschluss. Der Aufdruck OPEN muss nun lesbar sein. Zum einfachen Aufsetzen der Klammer auf den Haltearm halten Sie die Klammer am unteren Teil mit dem Zeigefinger und Daumen auseinandergespreizt.

Bedienungsanleitung

Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor®

- 2 -

Die Klammer kann nun auf den Haltearm aufgebracht werden, „Klick“. Die Klammer ist jetzt auf dem Haltearm frei beweglich und gegen Herabfallen gesichert.

Nach Einführen eines Wundhakens wird der Exzentergriff umgelegt und die Klammer ist geschlossen. Klammer und Instrument sind nun fixiert. Jetzt ist der Aufdruck CLOSED lesbar. Der Exzentergriff darf im geschlossenen Zustand nicht gedreht werden, um Beschädigungen der Klammer zu vermeiden. Zum Lösen der Klammer vom Haltearm wird der Exzentergriff geöffnet und der Wundhaken kann entfernt werden. Spreizen Sie auch hier wieder den unteren Teil der Klammer zwischen Daumen und Zeigefinger auseinander und ziehen die Klammer vom Haltearm ab.

Wundhaken:

Wundhaken können entweder „schwenkbar“ (mit Haltestange) sein oder auf so genannten Blatthaltern montiert werden. Die Haltestange kann anschließend in die Klammer eingeführt und dem Situs entsprechend positioniert werden. Siehe auch Punkt **Klammer**.

Situseinstellung:

Stellen Sie nun mit den zum System gehörigen Klammern und Wundhaken den Situs ein. Alle Blatthalter, schwenkbare Wundhaken und Exzentergriffe der Klammern können so positioniert und eingestellt werden, dass die Freiräume des Operateurs nicht beeinträchtigt werden.

Kontrollieren Sie, dass durch OP-bedingte Manipulationen keine Patientengefährdung entsteht.

Entlasten Sie regelmäßig das Gewebe.

Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® darf nur nach Einweisung in die sachgerechte Handhabung durch einen Medizinprodukteberater eingesetzt werden.

Achtung!

Das Wund-Spreizer-System GoldLine by Condor® darf nicht eingesetzt werden, wenn gleichzeitig MRT (Magnet-Resonanz-Tomographen) verwendet werden (Funktionsstörungen des MRT).

Es dürfen ausschließlich Komponenten verwendet werden, die durch die Condor GmbH freigegeben sind.

Zudem dürfen keine metallischen Gegenstände am Zentralhalter abgelegt werden.

Zur Lagerung, Aufbereitung und Sterilisation des Systems beachten Sie bitte auch unsere Pflege- und Gebrauchsanleitung. Außerdem gelten die allgemein gültigen Vorschriften und Empfehlungen (u. a. DIN EN ISO 17664:2004-07, RKI-Empfehlungen sowie AKI – Instrumentenaufbereitung richtiggemacht) zur Lagerung von resterilisierbaren Instrumenten.

Stand 29.01.19

CE 0044